




CS Masážní přístroj s funkcí zahřívání	
Návod k použití	4
SK Masážny prístroj s funkciou ohrievania	
Návod na obsluhu	7



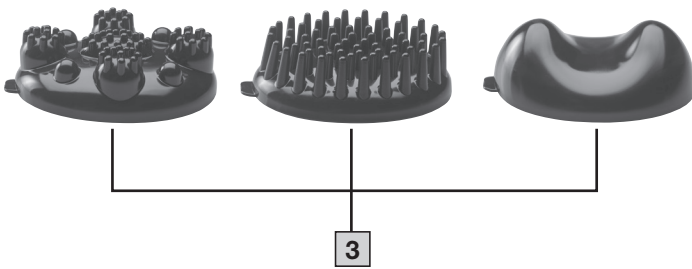

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Povrch přístroje je horký. Osoby, které jsou citlivé na teplo, musí být při používání opatrné.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení.....	4	7. Použití.....	6
2. Vysvětlení symbolů.....	4	8. Čištění a údržba.....	6
3. Použití v souladu s určením.....	5	9. Co dělat v případě problémů?.....	6
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5	10. Likvidace.....	6
5. Popis přístroje.....	6	11. Technické údaje.....	6
6. Uvedení do provozu.....	6	12. Záruka a servis.....	6

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1x masážní přístroj s funkcí zahřívání
- 3x vyměnitelné masážní nástavce
- 1x tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

V návodu a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.
	Informace o výrobku Upozornění na důležité informace

	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2.
	Přečtěte si pokyny
	Výrobce
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka
	Součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a vnitrostátních směrnic.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Produkt a součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Symbol dovozce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Nepoužívejte masážní přístroj, pokud pro vás platí jedno či více z následujících varovných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás masážní přístroj vhodný, zeptejte se svého lékaře.

VAROVÁNÍ

- Masážní přístroj nepoužívejte
 - u zvířat,
 - při výřezu meziobratlových plotének nebo patologických změnách na obratlích,
 - v žádném případě k masáži v oblasti srdce, jestliže máte kardiostimulátor a konzultujte nejdříve s lékařem i masáž jiných částí těla,
 - nikdy na oteklých, spálených, zanícených nebo poraněných částech těla,
 - v těhotenství
 - v obličejí (na očích), na hrtanu a jiných zvlášť citlivých částech těla,
 - během spánku,
 - po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímat).
- Před použitím masážního přístroje se poraďte s lékařem
 - pokud trpíte těžkou chorobou nebo jste prodělali nějakou operaci,

- pokud trpíte horečnatým nastydnutím, křečovými žilami, trombózou, zánětem žil, žloutenkou, diabetem, nervovým onemocněním (např. ischias) nebo akutními záněty.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věčné škody. Uchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předajte tento návod k použití při předání přístroje jiné osobě.

VAROVÁNÍ

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Úraz elektrickým proudem

VAROVÁNÍ

- Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento masážní přístroj opatrné a rozvádné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.
- Přístroj proto
 - používejte pouze se síťovým napětím uvedeným na přístroji,
 - nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
 - nepoužívejte při bouřce.
- Přístroj ihned vypněte a odpojte ho od elektrické sítě, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za síťový kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplejšími povrchy. Za žádných okolností přístroj neotevírejte.
- Pokud je síťový kabel přístroje poškozený, musí být nahrazen prodejcem nebo autorizovanou dílnou zákaznického servisu.
- Zajistěte, aby se masážní přístroj, zástrčka a kabel nedostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Přístroj proto používejte
 - jen v suchých vnitřních prostorách,
 - pouze suchýma rukama,
 - nikdy ho nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo v blízkosti napuštěných umyvadel,
 - nikdy ho nepoužívejte v bazénu, ve vířivkách nebo v sauně,
 - nikdy ho nepoužívejte venku.
- Nikdy nesahejte na přístroj, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.

Opravy

VAROVÁNÍ

- Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. S opravami se obračete na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru

VAROVÁNÍ

- Při nesprávném používání přístroje, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!
- Masážní přístroj proto

- nenechávejte nikdy bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti dětí,
- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem ...

Manipulace

⚠ POZOR

- Přístroj je třeba vypnout a odpojit od elektrické sítě po každém použití a před každým čištěním.
 - Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
 - Dávejte pozor na to, aby se do přístroje nezamotaly vlasy.
 - Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
 - Kabel nelámejte.
- Chraňte přístroj před příliš blízkými tepelnými zdroji, jako jsou kamna nebo topná tělesa, a před přímým slunečním zářením.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

Vypínač

Lo: lehká vibrační masáž

Hi: silná vibrační masáž

P1: masážní program 1

P2: masážní program 2

- možnost připojení funkce zahřívání
- vyměnitelné masážní nástavce

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda přístroj, síťová zástrčka nebo kabel nejsou poškozeny.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj je v pohotovostním režimu.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

7. POUŽITÍ

Stisknutím vypínače zvolte požadovanou intenzitu masáže nebo požadovaný masážní program.

Jednou nebo oběma rukama přiložte přístroj k masírované části těla. Můžete stát, sedět nebo ležet a masírovat sebe nebo jinou osobu. Silnějším nebo méně silným přitlačením masážního přístroje můžete měnit intenzitu masáže. Nemasírujte příslušnou část těla déle než 3 minuty, přejděte pak k jinému místu na těle. Masáž můžete provádět s masážním nástavcem nebo bez nástavce. Podle potřeby vyberte jeden z masážních nástavců. U doplňkové zapnutelné funkce zahřívání brání nasazené masážní nástavce tepelnému ošetření. Používejte proto přístroj pouze bez zahřívání, jestliže máte nasazený masážní nástavec.

- i** Nepožívejte masážní přístroj krátce před spaním. Masáž může mít i stimulující účinek a mohla by způsobit poruchy spánku.

⚠ VAROVÁNÍ

Masáž musí být vždy příjemná a uvolňující. Masáž přerušete nebo změňte polohu masážního přístroje, pokud ji pociťujete jako bolestivou nebo nepříjemnou.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

Při čištění musí být přístroj odpojený od sítě a vychladlý, otírejte ho pouze lehce navlhčenou utěrkou. Můžete použít také jemný čisticí prostředek.

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
- Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.

Uložení

Ukládejte masážní přístroj mimo dosah dětí na suché, chladné místo. Doporučujeme ho ukládat v originálním obalu.

9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Příčina	Odstranění problému
Přístroj nefunguje	Přístroj není připojen k síti.	Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj.
	Přístroj není zapnutý.	Zapnutí přístroje

10. LIKVIDACE

⚠ POZOR

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	220-240V~ 50-60Hz 5W
Velikost:	30,5 x 7,5 x 6,7 cm
Hmotnost:	cca 350 g

12. ZÁRUKA A SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VAROVANIE

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické privodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Povrch prístroja je horúci. Osoby, ktoré sú citlivé na teplo, musia byť pri používaní prístroja opatrné.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

Obsah

1. Obsah balenia	7	7. Použitie	9
2. Vysvetlenie symbolov	7	8. Čistenie a starostlivosť	9
3. Účel použitia.....	8	9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	9
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	8	10. Likvidácia.....	9
5. Popis prístroja.....	9	11. Technické údaje.....	9
6. Uvedenie do prevádzky.....	9	12. Záruka/servis.....	9

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznickeho servisu.

- 1x masážny prístroj s funkciou ohrievania
- 3x vymeniteľné masážne nadstavce
- 1x tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

V návode na použitie a na typovom štítku sú použité tieto symboly:

	VAROVANIE Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.

	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
	Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2.
	Prečítajte si pokyny
	Výrobca
	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón
	Oddelte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

3. ÚČEL POUŽITIA

Tento prístroj je určený na masáž jednotlivých častí ľudského tela. Prístroj nemôže nahradiť liečbu lekárom. Masážny prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré výstražné upozornenia. Ak si nie ste istý, či je pre vás masážny prístroj vhodný, poraďte sa so svojim lekárom.

VAROVANIE

- Masážny prístroj nepoužívajte
 - na zvieratách,
 - v prípade hernie medzistavcovej platničky alebo chorobných zmien chrbtice,
 - v žiadnom prípade na masáže v oblasti srdca, ak máte implantovaný kardiostimulátor, a aj o iných častiach tela sa najprv poraďte so svojim lekárom,
 - nikdy na opuchnutých, popálených, zapálených alebo poranených častiach kože a tela,
 - počas tehotenstva,
 - na tvári (očiah), na hrtane alebo iných obzvlášť citlivých častiach tela,
 - nikdy počas spánku,
 - po užití liekov alebo alkoholu (obmedzená schopnosť vnímania),

- Pred použitím masážneho prístroja sa poraďte so svojim lekárom,
 - ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu,
 - v prípade horúčkovitých prechladnutí, pri kŕčovných žilách, trombózach, zápaloch žíl, žltacke, diabete, ochoreniach nervov (napr. ischias) alebo akútnych zápaloch.

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uchovajte tento návod na použitie a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

VAROVANIE

- Obal uchováajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Zásah elektrickým prúdom

VAROVANIE

- S týmto masážnym prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretné, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
- Preto
 - prístroj používajte iba so sieťovým napätím uvedeným na prístroji,
 - nikdy nepoužívajte, keď prístroj alebo príslušenstvo vykazuje viditeľné poškodenia,
 - nepoužívajte počas búrky.
- Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú prevádzkové poruchy, a odpojte ho od zdroja napájania. Neťahajte za elektrický kábel alebo za prístroj, ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj uchopením za sieťový kábel. Udržiavajte odstup medzi káblami a teplými povrchmi. Za žiadnych okolností neatvárajte prístroj.
- V prípade, že je poškodený sieťový kábel prístroja, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizované zákaznícke centrum.
- Uistite sa, že masážny prístroj, zástrčka a kábel neprichádzajú do styku s vodou alebo inými tekutinami.
- Preto používajte prístroj
 - len v suchých miestnostiach,
 - iba so suchými rukami.
 - nikdy nie vo vani, sprche alebo pri naplnenom umývadle,
 - nikdy nie v bazéne, vírivých vaniach alebo saune,
 - nikdy vonku.
- V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku.

Oprava

VAROVANIE

- Opravy na elektrických prístrojoch smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Nebezpečenstvo požiaru

VAROVANIE

- V prípade nesprávneho používania, resp. používania v rozpore s týmto návodom na použitie, existuje za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!
- Preto masážny prístroj
 - nikdy nenechávajte bez dozoru, predovšetkým, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti,
 - nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom...

Manipulácia

POZOR

- Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.
 - Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať.
 - Dávajte pozor, aby sa na prístroji nezachytili vlasy.
 - Zabráňte kontaktu so špicatými alebo ostrými predmetmi.
 - Kábel nezalamujte.
 - Prístroj chráňte pred tepelnými zdrojmi v prílišnej blízkosti, ako sú sporáky, vykurovacie telesá alebo priamym sľečným žiarením.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Lo: ľahká vibračná masáž

Hi: silná vibračná masáž

P1: Masážny program 1

P2: Masážny program 2

2 prídavná funkcia ohrievania

3 vymeniteľné masážne nastavce

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Odstráňte obal.
- Skontrolujte prístroj, zástrčku a kábel, či nie sú poškodené.
- Pripojte prístroj do elektrickej siete. Prístroj sa nachádza v pohotovostnom režime.
- Kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.

7. POUŽITIE

Vyberte požadovanú intenzitu masáže alebo želaný masážny program stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.

Jednou alebo dvoma rukami presuňte prístroj k časti tela, ktorá sa má masírovať. Môžete stáť, sedieť alebo ležať a môžete masírovať seba alebo inú osobu. Silným alebo menej silným prítlačným masážnym prístroja je možné meniť intenzitu masáže. Určité miesto na tele nemasírujte dlhšie ako 3 minúty a následne prejdite na ďalšiu oblasť tela.

Masáž môžete vykonávať s masážnym nastavcom alebo bez neho. Vyberte si na to ľubovoľne jeden masážny nastavec. Pri prídavnej funkcii ohrievania zabráňujú nasadené masážne nastavce tepelnému ošetreniu. Prístroj preto používajte bez tepla len vtedy, keď je nastrojený masážny nastavec.

i Masážny prístroj nepoužívajte krátko pred spaním. Masáž môže mať aj stimulujúce účinky a môže spôsobiť problémy so zaspávaním.

VAROVANIE

Masáž musí vždy pôsobiť príjemne a uvoľňujúco. Masáž prerušte alebo zmeňte polohu masážneho prístroja, ak je masáž pre vás bolestivá alebo nepríjemná.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie

Odpojený a vychladnutý prístroj utrite mierne navlhčenou utierkou. Môžete pritom použiť jemný čistiaci prostriedok.

VAROVANIE

- Prístroj pred každým čistením vytiahnite zo zásuvky.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

Skladovanie

Masážny prístroj skladujte mimo dosahu detí na suchom a chladnom mieste. Odporúčame uskladnenie v originálnom obale.

9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Príčina	Odstránenie
Masážny prístroj nefunguje	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte sieťovú zástrčku a zapnite prístroj.
	Prístroj nie je zapnutý.	Zapnite prístroj.

10. LIKVIDÁCIA

POZOR

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.



11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 5 W
Rozmery:	30,5 x 7,5 x 6,7 cm
Hmotnosť:	cca 350 g

12. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way, WA3 2SH Golborne, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com



102.56_MG24_2023-07-17_01_IM2_BEU_CS_SK